






**PRELEVEMENT D URINES POUR EXAMEN HORS CYTO-BACTERIOLOGIE**

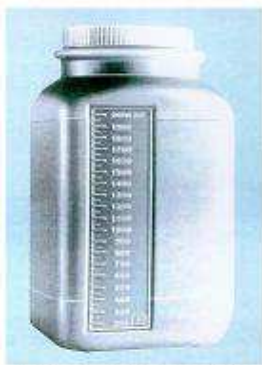

1 - Utiliser le bocal à urine (omogénéiser les urines)

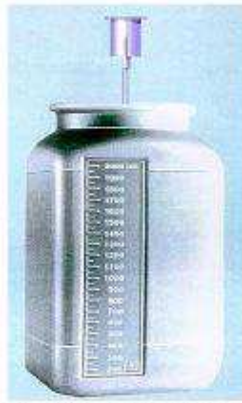

2 - Plonger la canule dans les urines.

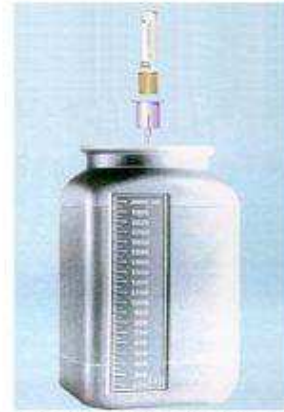

3 - Insérer le tube de biochimie (bouchon beige) dans la canule.



4 - Etiqueter le tube (l'envoyer au laboratoire).



5 - Eliminer la canule dans le container

Canule de transfert  
réf. BD 364940  
Ref CHU : N0000043



Tube Urine de  
biochimie 7ml  
Réf. BD : 368501  
Ref CHU : N0000044



Date d'application : 19/03/2013

**TABLEAU D'APPROBATION**

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom :	PEUCHANT EVELYNE	CHAUZIT EMMANUELLE	COMBOURIEU ISABELLE	FLEURY HERVE	POMMIERS SYLVIE
Signature :	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT				